


MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

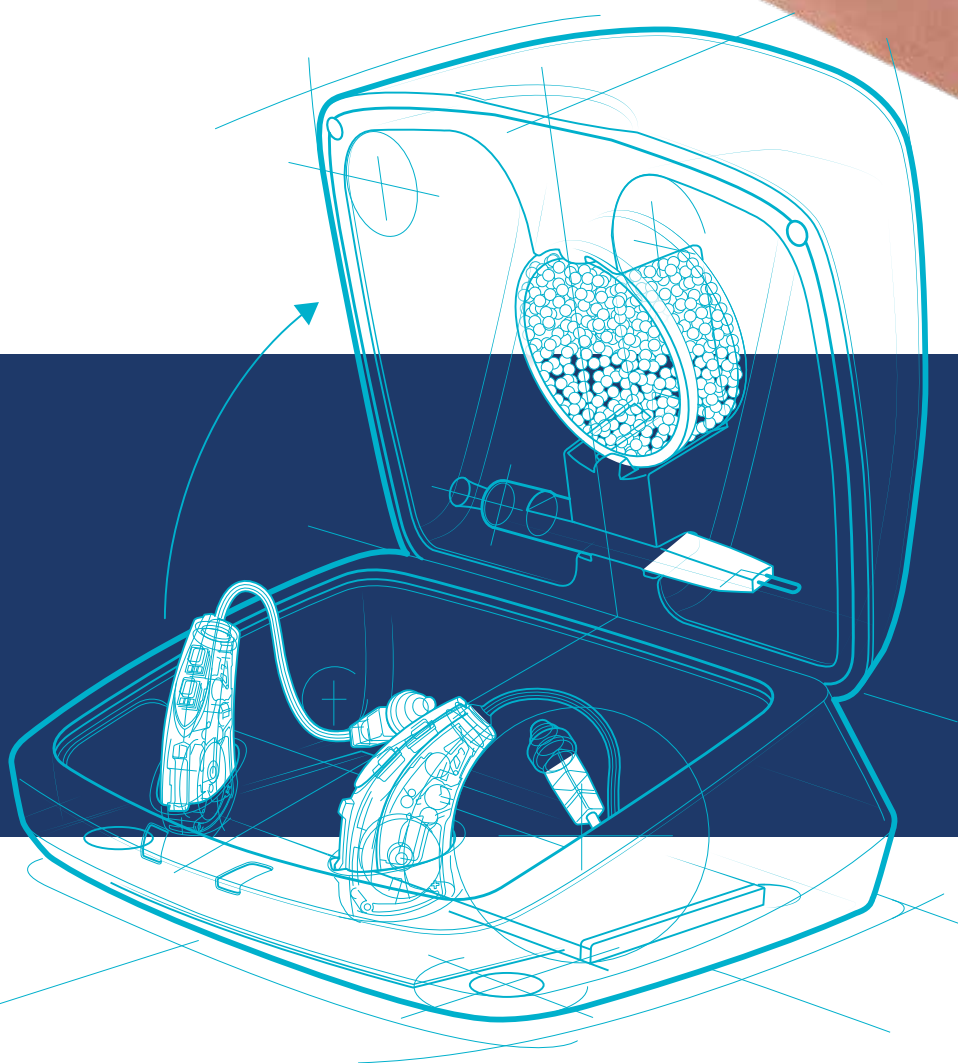

**APARELHOS
AUDITIVOS E CPAP**

MICROSOM BH: OUÇA MELHOR, VIVA MELHOR.

GRUPO
**micro
som**
BELO HORIZONTE



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

CARREGADOR PORTÁTIL

Com bateria portátil, consegue carregar seus aparelhos auditivos 3 vezes, sem precisar ligar na tomada.



DESUMIDIFICAÇÃO

Possui um espaço para colocar sílica de desumidificação.



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

CAIXA DO CARREGADOR

Pequena, fácil de abrir e manipular: pode ser usada para transportar e armazenar os aparelhos auditivos quando não estiverem em uso.



LED INDICADOR DE CARGA

Sinaliza quando os aparelhos auditivos estão carregando ou quando o carregamento está concluído.



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

IDENTIFICADORES



- 1** SUPORTE DA SILICA
- 2** ESCOVA DE LIMPEZA
- 3** BASE DE CARREGAMENTO
- 4** LEDS DA FRENTE: CARREGAMENTO DO APARELHO
- 5** ENTRADA DE CARREGAMENTO USB
- 6** LEDS DE TRÁS:
CARGA DO CARREGADOR/BATERIA INTEGRADA



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

IDENTIFICADORES



7



8

7 ADAPTADORES DE TOMADA

8 CABO USB



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

COMO CONECTAR

Conecte o cabo USB no adaptador conforme a imagem abaixo:



Depois conecte o adaptador em uma tomada:



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

COMO CONECTAR

Conecte o outro lado do cabo USB na parte de trás do carregador, conforme a imagem abaixo:



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

LUZES

- **VERDE PISCANDO:** Carregando
- **VERDE SÓLIDO:** Totalmente carregado

- **VERMELHO PISCANDO:** Estado de erro
Neste caso retire os aparelhos do carregador, aguarde até que os LEDs desliguem e coloque novamente os aparelhos auditivos no carregador. Se o erro continuar entre em contato com a Microsom BH.



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

CARREGAMENTO

- 1** Todos os dias, a noite, ao dormir coloque os aparelhos auditivos encaixados no carregador, com as tulipas na parte de dentro do estojo.



- 2** Seus aparelhos irão desligar automaticamente e começar a carregar.
- 3** No dia seguinte, ao acordar, retire o carregador da tomada e coloque os aparelhos auditivos no ouvido.



CARREGAMENTO

- 4** O carregador recarrega um par de aparelhos auditivo até 3 vezes, ou seja, possibilita **3 cargas completas** sem a necessidade de estar na tomada.





Para isso, o carregador deverá estar com carga (as 4 luzes verdes acesas na parte de trás sinalizam carga superior a 75%).





MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

CARREGAMENTO

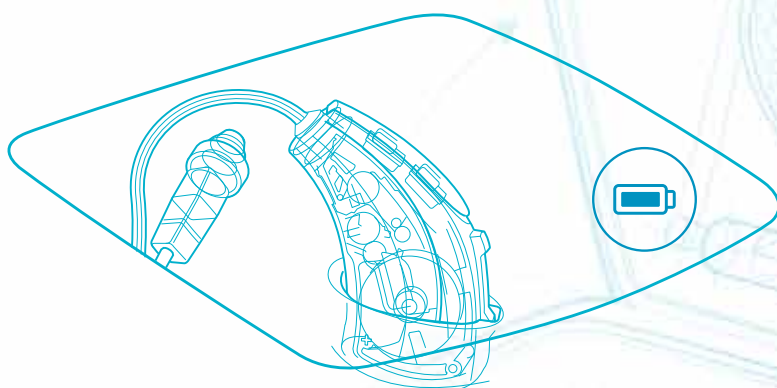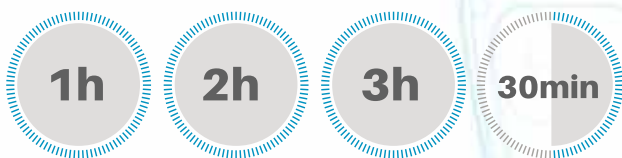5 Em **3 horas e 30 minutos** o carregador atinge a carga completa.




CARGA COMPLETA  =  **ATÉ 30 HORAS DE USO**



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

CUIDADOS

- 1** É importante verificar a sílica. A cor irá mudar para transparente ou amarelado, indicando a necessidade de substituição do refil da sílica.

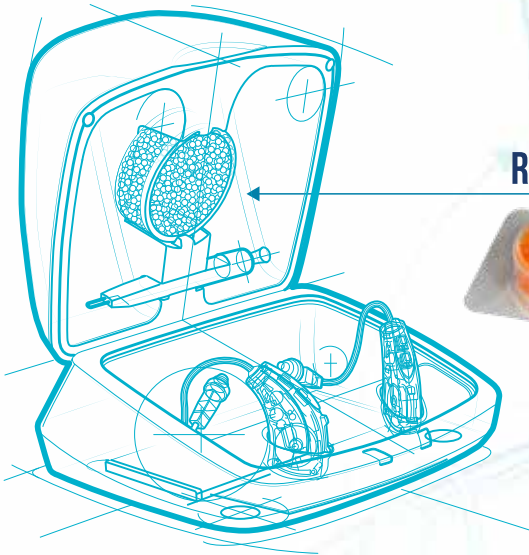

REFIL DA SÍLICA.



- 2** Mantenha a tampa do carregador fechada o máximo possível, para evitar o acúmulo de sujeira e poeira.



MANUAL DO CARREGADOR PORTÁTIL

CUIDADOS

- 3** Mantenha todas as áreas do carregador limpas e secas, usando a escova de limpeza.
- 4** Calor, umidade e substâncias estranhas podem acarretar em mau desempenho.
- 5** Não use água, solventes ou produtos de limpeza para limpar as portas de carregamento.
- 6** Para garantir a maior vida útil das baterias recarregáveis do aparelho auditivo e das baterias do carregador, carregue completamente os aparelhos auditivos toda noite.



APARELHOS AUDITIVOS E CPAP

MICROSOM BH: OUÇA MELHOR, VIVA MELHOR.

SANTA EFIGÊNIA 

PRADO 

BETIM 

PONTOS DE ATENDIMENTO:
OURO PRETO | SETE LAGOAS



WWW.MICROSOMBH.COM.BR

UNIDADE SANTA EFIGÊNIA

55 31 3222-5157 | 9 8479-6922

RUA DOS OTONI, 881

SALA 501- 505 - BH - MG

UNIDADE BETIM

55 31 3511-5649 | 3511-8753 | 9 8286-9832

AV. GOVERNADOR VALADARES, 444

LOJA 03 - BETIM - MG

UNIDADE PRADO

55 31 2127-3227 | 9 8452-6102

AV. DO CONTORNO, 9153

LOJA 1 - BH - MG

WWW.MICROSOMBH.COM.BR
