


MANUAL DO MINICARREGADOR TURBO

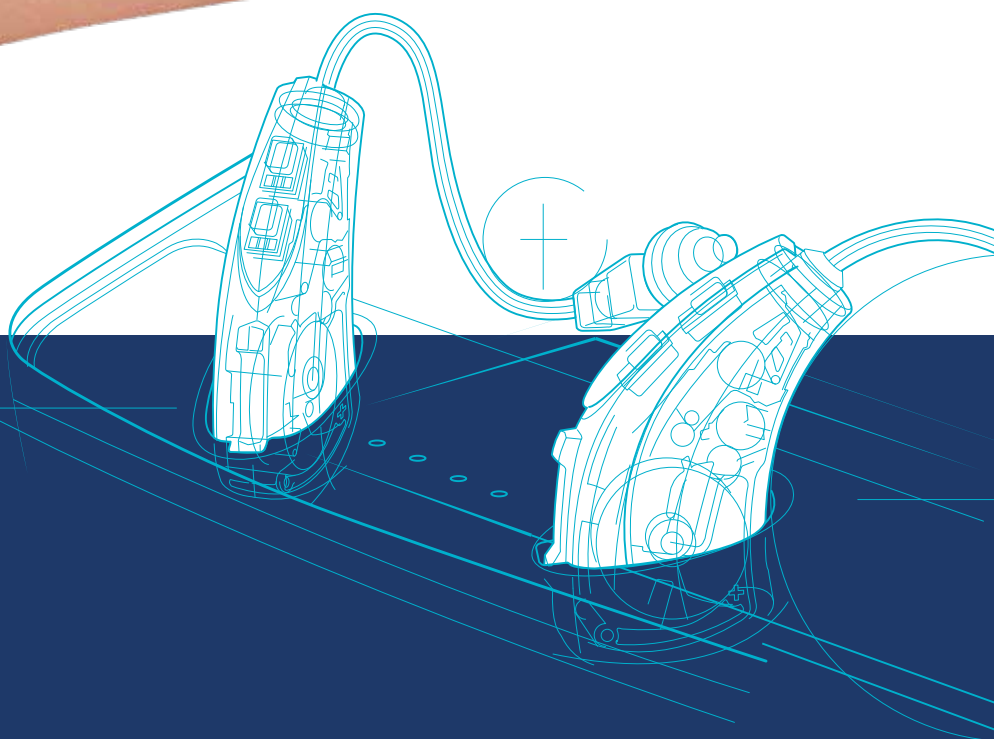

**APARELHOS
AUDITIVOS E CPAP**

MICROSOM BH: OUÇA MELHOR, VIVA MELHOR.

GRUPO
**micro
som**
BELO HORIZONTE



MANUAL DO MINICARREGADOR TURBO



O MINI CARREGADOR TURBO

é uma opção leve e conveniente. Cabe no bolso e está disponível para pacientes com os seguintes aparelhos auditivos:

Via Edge AI RIC;

Via AI nas versões RIC e BTE recarregáveis;

Via nas versões RIC e BTE recarregáveis;

A4iQ RIC recarregável.



MANUAL DO MINICARREGADOR TURBO

ULTRA RÁPIDO

fornece **3,5 horas** de uso de aparelho auditivo em apenas **sete minutos**.



LEDS INDICADORES DE CARGA

permitem que os pacientes saibam quando seus aparelhos auditivos estão totalmente carregados.



IDENTIFICADORES



1 ENTRADA MICRO-USB DE CARREGAMENTO

2 LEDS DE CARREGAMENTO

os leds indicam a carga, tanto do aparelho auditivo quanto da bateria integrada.

3 CABO USB

4 CAPA PROTETORA



COMO CONECTAR

- 1** Coloque seus aparelhos auditivos no Mini Carregador Turbo com a tulipa/molde apontado para frente do carregador, como mostra a figura:




- 2** Os aparelhos serão desligados automaticamente e começarão a carregar.





MANUAL DO MINICARREGADOR TURBO

CARREGAMENTO

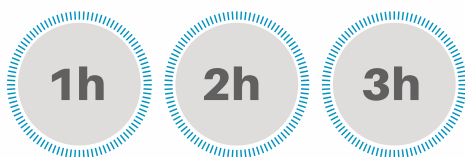Seus aparelhos estarão totalmente carregados em menos de 3 horas.



CARGA COMPLETA  =  ATÉ 24H HORAS DE USO




MANUAL DO MINICARREGADOR TURBO

CARREGAMENTO

O Mini Carregador Turbo recarrega um par de aparelhos auditivo até 4 vezes, ou seja:

Possibilita 4 cargas completas sem a necessidade de reconectá-lo ao cabo USB.

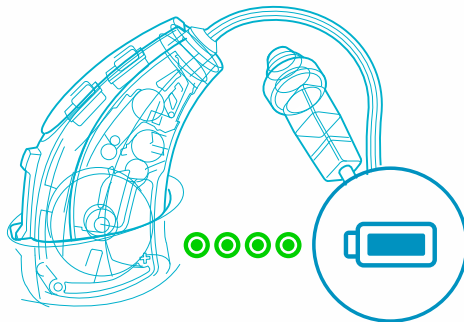

CARGA COMPLETA DO CARREGADOR



ATÉ 4 CARGAS DOS APARELHOS



MANUAL DO MINICARREGADOR TURBO

CARGA RÁPIDA

7 MINUTOS
DE CARGA



=



ATÉ 3H30
DE USO



MINICARREGADOR TURBO

Ideal para levar em reuniões, aeroportos e em várias situações onde é necessário ter uma carga imediata.

Para manter a bateria do carregador em capacidade máxima, é necessário carregar o carregador uma vez a cada 3 semanas.



● **VERDE PISCANDO:** Carregando.

● **VERDE SÓLIDO:** Totalmente carregado.

● **VERMELHO PISCANDO:** Estado de erro

Neste caso retire os aparelhos do Mini Carregador Turbo, aguarde até que os LEDS desliguem e coloque novamente os aparelhos auditivos no carregador.

Se o erro continuar entre em contato com a Microsom BH.

●●●● **OS 4 LEDS PISCANDO EM SEQUÊNCIA:**
Carga do mini-carregador turbo.



CUIDADOS

- 1** Mantenha o carregador limpo. Calor, umidade e materiais estranhos podem causar baixo desempenho.
- 2** Limpe o carregador com um pano seco e limpo. Nunca use água, solventes ou produtos de limpeza para limpar as entradas do carregamento.
- 3** Mantenha o seu Mini Carregador Turbo em sua capa protetora enquanto não estiver em uso.



APARELHOS AUDITIVOS E CPAP

MICROSOM BH: OUÇA MELHOR, VIVA MELHOR.

SANTA EFIGÊNIA 

PRADO 

BETIM 

PONTOS DE ATENDIMENTO:
OURO PRETO | SETE LAGOAS



WWW.MICROSOMBH.COM.BR

UNIDADE SANTA EFIGÊNIA

55 31 3222-5157 | 9 8479-6922

RUA DOS OTONI, 881

SALA 501- 505 - BH - MG

UNIDADE BETIM

55 31 3511-5649 | 3511-8753 | 9 8286-9832

AV. GOVERNADOR VALADARES, 444

LOJA 03 - BETIM - MG

UNIDADE PRADO

55 31 2127-3227 | 9 8452-6102

AV. DO CONTORNO, 9153

LOJA 1 - BH - MG

WWW.MICROSOMBH.COM.BR
